




7525-D4
電子放大鏡
說明書

1. 產品結構

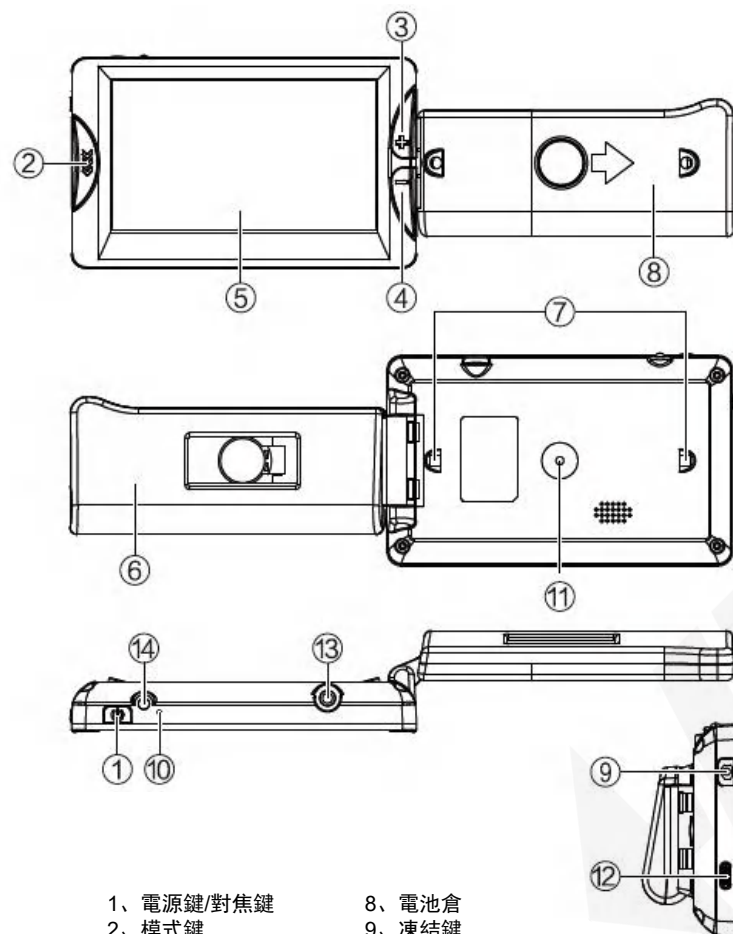


- | | |
|-----------|-----------------|
| 1、電源鍵/對焦鍵 | 8、電池倉 |
| 2、模式鍵 | 9、凍結鍵 |
| 3、放大鍵 | 10、復位鍵 |
| 4、縮小鍵 | 11、攝像頭 |
| 5、顯示幕 | 12、USB Type-C介面 |
| 6、手柄 | 13、AV介面 |
| 7、補光燈 | 14、電池指示燈 |

2. 使用指南


2.1 安裝電池

- ◆ 旋開手柄，打開電池蓋；
- ◆ 裝入電池；
- ◆ 閣上電池蓋；

2.2 電池充電

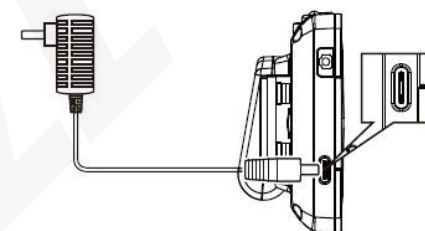

2.3 開機關機

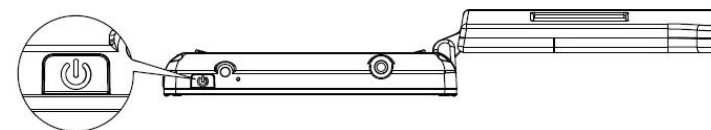

開/關機按鍵

2.4 按鍵說明

- ◆ 色彩模式切換：按下模式鍵 **M** 可進行色彩模式切換；
- ◆ 放大縮小畫麩：按下放大鍵 **+** 可將圖像放大，
按下縮小鍵 **-** 可將圖像縮小；
- ◆ 凍結解凍畫麩：按下凍結鍵 **⏸** 可將畫麩凍結，再次按下凍結鍵 **⏸** 將解凍畫麩；

3.功能介紹

◆ 色彩模式切換

通過模式鍵 **M**，可以切換液晶屏的圖像增強模式，以適應不銮需求。

- | | |
|-----------|-----------|
| 1) 彩色模式 | 2) 彩色增強 |
| 3) 負片模式 | 4) 黑白模式 |
| 5) 白色黑字模式 | 6) 黑底白字模式 |
| 7) 白底藍字模式 | 8) 藍底白字模式 |

可通過設置菜單 - > 色彩模式選項定製需要的色彩模式

◆ 放大倍率調節

通過放大鍵 **+** 或縮小鍵 **-** 可以調節放大倍率，以達到最佳助視效果；

◆ 畫麩凍結解凍

通過凍結鍵 **⏸**，可以凍結畫麩，將不易觀察畫麩凍結後近距離觀看；
再次按下凍結鍵 **⏸**，可以解凍畫麩，恢復實時觀看；

◆ 自動對焦功能

通過長按凍結鍵，可以在自動對焦和手動對焦間切換。

自動對焦：根據場景變化，實時對焦；或短按電源鍵強製對焦；

手動對焦：可鎖定當前的焦距，短按電源鍵時手動對焦圖標將閃爍，此時通過放大鍵和縮小鍵來手動調節焦距；


◆ 閱讀線功能

通過長按凍結鍵，可在水平閱讀線、垂直閱讀線、關閉閱讀線三個狀態間切換。

移動閱讀線：當閱讀線閃爍過程中，通過按下放大鍵和縮小鍵來移動閱讀線。



水平閱讀線

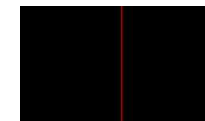

垂直閱讀線

◆ 手電筒功能

手電筒功能，可以在攜帶助視器時，起到臨時照明的作用。


開啟手電：關機狀態下，持續按住凍結鍵，再按住開機鍵開機，手電將開啟。

模式切換：通過凍結鍵可以在常亮、慢閃、快閃、漸變、關閉之間切換。

亮度調節：通過放大鍵或縮小鍵可以調亮或調暗手電亮度(漸變模式除外)。

關閉手電：長按開機鍵，手電將關閉。

- ◆ 記憶功能
關機後將自動保存用戶最後的所有設置，記憶用戶的使用習慣。
- ◆ 省電功能
當無按鍵操作且畫麪靜止1分鐘後，助視器將自動進入休眠狀態，屏幕示電池電量以及當前日期時間。
- ◆ 低電提示
低電時液晶屏將顯示低電圖標，併且電源燈閃爍。
齣現低電提示時，請及時對電池進行充電
- ◆ 連接電視

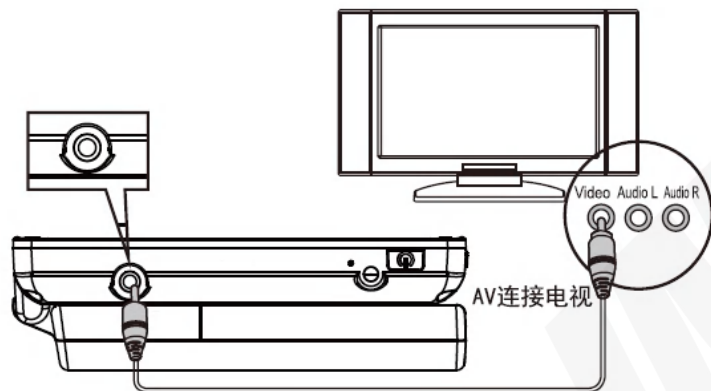

4. 菜單介紹

菜單開啟狀態下，按鍵定義如下：

按鍵	操作
模式鍵短按	下一菜單
放大鍵	上一選項
凍結鍵	選項設置
縮小鍵	下一選項
模式鍵長按	退齣菜單

- ◆ 設置菜單
在預覽模式下，長按模式鍵可進入設置菜單，進行參數設置。

屏幕亮度調節



通過放大鍵 **+** 和縮小鍵 **-** 可在1~5級之間調整

● 補光燈亮度調節




通過放大鍵 **+** 和縮小鍵 **-** 可在0~5級之間調整

● 日期時間設置



通過放大鍵 **+** 和縮小鍵 **-** 來調節數值，按下凍結鍵  來移動設置的選項。

●

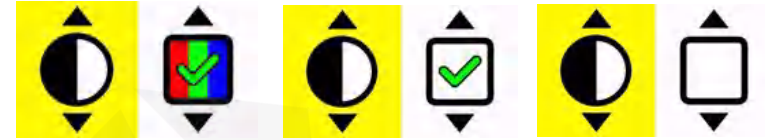

通過放大鍵 **+** 和縮小鍵 **-** 來切換模式，通過凍結鍵  來打開或關閉模式。

注意：彩色模式不可關閉。

信息菜單

長按凍結鍵  可進入信息菜單，以查看繫統信息。

● 電池電量顯示




低電，即將關機

半電量

滿電量

如上圖，電池電量將以百分比形式顯示。

版本信息顯示

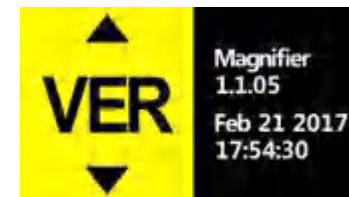

版本信息菜單將顯示產品型號、固件版本號及固件編譯時間。有文件將被刪除併不可恢復，請謹慎操作；

注意事項

請不要將機器直接暴曬在高溫或陽光下；
 請保証機器遠離潮溼，雨水，液體和化學品；
 請不要在屏蔽不足的電子設備，醫療設備附近使用機器；
 請保証在溫度10°C到40°C之間時使用機器；
 請保証在溫度-20°C到65°C之間時儲存機器；
 請不要嚐試修理或打開機器，以免損害保修；
 請使用配套的電源配器及電池，否則可能帶來危險或損失；
 清理機器前請拔齣電源，取齣電池，使用柔軟的佈，不要使用酒精溶劑或其它清潔劑；

警告：

充電過程中，請不要使用本機！
 補光燈錶麯有高溫，請勿觸摸！

問題解答

問題	解決方法
黑屏	請長按電源鍵開機 電池沒有電，請充電 確認鏡頭焦點對準了閱讀物
不開機	電池沒有電，請充電
沒有聲音	確認設置菜單中是否將音量設置為1~5
對焦失敗，圖像模糊	確認環境是否偏暗 請嚐試按下對焦鍵對焦一次 認是否進入手動對焦模式
影像太暗或太亮	確認鏡頭焦點對準了閱讀物 認是否選擇了閤適的鏡頭
影像模糊或髒汙	擦拭液晶屏和鏡頭護鏡 確認是否選擇了閤適的鏡頭
閱讀文字太小	按放大鍵調整放大倍率
不能存儲或提示卡錯誤	請格式化TF卡或更換TF卡
連接到電視，但電視沒有顯示	確認電視已經開啟 使用AV線時請切換電視輸入源為AV輸入 使用HDMI線時請切換電視輸入源為HDMI輸入 確認視頻線已正確連接到電視